

VIKTIG SIKKERHETS- OG PRODUKTINFORMASJON

Gjelder Nordic Evolution guide-modul, heretter kalt enheten.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Nordic Evolution eller dets samarbeidspartnere er under ingen omstendigheter ansvarlige for midlertidige, langvarige, spesielle, indirekte eller følgeskader, og heller ikke for konsekvenser/skader knyttet til lovbrudd, bøter eller søksmål. Dette gjelder uavhengig av om skadene skyldes bruk, feilbruk, defekter på enheten eller manglende evne til å håndtere enheten og tilhørende produkter.

ADVARSEL

Enheten skal kun brukes til digital ledsaging av mennesker, og ikke til andre formål. Feil bruk av enheten kan føre til kollisjon eller andre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som følge. Bruk systemet med godt skjønn tilpasset situasjonen, systemets ytelse og brukerens evner. Nedenfor beskrives noen farlige forhold som bør unngås, risikofylte situasjoner hvor forsiktighet er påkrevd, samt andre viktige sikkerhetshensyn.

Installasjon

- Monter enheten sikkert på kroppen slik at den ikke faller av. En mistet enhet kan være vanskelig å finne.
- Bruk kun hodetelefonene for kommunikasjon med enheten.
- Bruk kun medfølgende hodetelefoner.
- Unngå andre forstyrrende lydkilder ved ledsaging.
- Sørg for at du hører omgivelsene dine, og unngå bruk av in-ear-hodetelefoner.
- Legg gjerne til ekstra referansepunkter, spesielt ved startpunktet, langs ruten – knyttet til fysiske landemerker (kumlokk, stein, benk, stolpe osv.) for bedre posisjonsnøyaktighet.
- Husk at terreng, trær og bygninger kan påvirke posisjonen negativt. Raskt endrende eller lokale værforhold påvirker også. Vær ekstra forsiktig under slike forhold.
- Sørg for at det er tilgang til mobildata i området. Tilgangen kan variere mellom ulike enheter og leverandører, og også påvirkes av værforhold.
- Bruk samme eller tilsvarende mobildataløsning ved oppmåling av ny rute som ved senere navigering.
- Kontakt Nordic Evolution dersom du er usikker på om en oppmålt rute har tilstrekkelig posisjonsnøyaktighet.
- Når du bruker enheten, samler Nordic Evolution inn data som IP-adresse, posisjon, tidspunkt, dato, batterinivå osv. for å identifisere og rette feil eller synkroniseringsproblemer og gi bedre kundeservice. Se Nordic Evolutions personvernerklæring for mer informasjon.

- Enheten skal ikke brukes til navigasjon av kjøretøy.

Kollisjon

- Enheten har ingen funksjon for å oppdage nye eller bevegelige hindringer som ikke er med i ruteoppmålingen.
- For å unngå kollisjoner, bruk hvit stokk eller annet egnet hjelpemiddel for nærområdedeteksjon.
- Bruk klær i klare farger og reflekterende materiale, og vurder varseltekst for å redusere kollisjonsfare med andre personer.
- En fysisk ledsager bør følge med dersom det er høy risiko for kollisjoner.
- Vær oppmerksom på advarsler fra enheten og iverksett passende tiltak. Eksempel: Stopp, eller gå sakte fremover og tilkall hjelp.

Terrengnavigasjon

- Del posisjonen din med en kontaktperson via mobilens GPS-system.
- Informer en kontaktperson om ruten og tidsplanen din.
- Forbered deg godt før friluftaktiviteter, som å sjekke værmelding, vannføring, og ta med kompass, fløyte, førstehjelpsutstyr, nødproviant, ekstra klær og vindsekk hvis forholdene krever det.
- Unngå farlige ruter og usikre situasjoner, som bratte stup, hull i terrenget eller tett skog nær stien.
- Skog, bygninger og kupert terreng kan redusere posisjonsnøyaktigheten.
- Sørg for at ruten er opprettet i samme årstid som den skal brukes, da naturen kan endre forutsetningene.
- Vær ekstra forsiktig ved nye ruter. Kontakt gjerne den som har laget ruten eller noen som nylig har gått den.
- Unngå avsperrede områder.
- Kjenn til hovedkompassretningen for ruten i tilfelle nød, og ha et sekundært alternativ (som en vei eller annet orienteringspunkt).
- Vær forberedt på å kunne returnere langs samme rute ved nødsituasjoner.
- Ha med en ledsager om mulig, ellers bruk godt skjønn for å gjennomføre eller avbryte aktiviteten..

Navigasjon i by og trafikkerte områder

- Tilpass farten etter bymiljøet.
- Enheten er ikke utviklet for navigering i bymiljø. For eksempel kan store bygninger og elektromagnetiske forstyrrelser forringe posisjonsnøyaktigheten. Brukeren skal redusere risikoen ved å forberede seg godt og utvise godt skjønn.
- Stans før du endrer innstillinger eller bruker andre funksjoner på enheten.
- Fokuser på navigasjon og omgivelser. Unngå forstyrrende

aktiviteter.

- Følg gjeldende trafikkregler og forstå dem før du fortsetter.
- Bybildet er i konstant endring – ta hensyn til mennesker, dyr, kjøretøy, maskiner, flyttbare objekter, veiarbeid, snøbrøyting, varierende underlag, parkerte kjøretøy m.m.
- Sørg for at ruten er oppdatert med pålitelig informasjon.

Batterihåndtering

- Enheten har et innebygd litium-ion-batteri som ikke kan byttes av brukeren. Nordic Evolution tilbyr batteribytte mot betaling.
- Batteriets levetid og sikkerhet påvirkes av flere faktorer. Følgende retningslinjer bidrar til å optimalisere levetiden og redusere risiko for kjemiske forbrenninger, brann, lekkasje, samt skade på miljø, enhet eller person:
 - Ikke utsett enheten for høy varme, f.eks. sollys i lukket bil.
 - Ikke lag hull i enheten eller batteriet.
 - Oppbevar enheten mellom +5 og 20 °C, ikke i direkte sollys.
 - Bruk enheten kun i temperaturer mellom -15 og +25 °C.
 - Ved slutten av livssyklusen skal enheten returneres til Nordic Evolution eller leveres til gjenvinning i henhold til lokale forskrifter.
- Hold enheten utilgjengelig for barn.
- Hvis du bruker en lader (nettadapter og/eller kabel) som ikke er levert av Nordic Evolution, +++må den være i samsvar med riktig spenning i henhold til USB-standard.
- Lad enheten under tilsyn på en sikker plass – ikke la den lades uten tilsyn over natten.
- Slå av enheten under lading for å unngå unødvendig varmeutvikling og sikre optimal lading.
- Ta med en powerbank og ladekabler hvis det er behov for å lade komponenter i ledsagersystemet underveis.

Bruk av enheten samtidig med medisinsk utstyr

- Unngå å bruke enheten samtidig med medisinsk utstyr som kan påvirkes – særlig utstyr med elektroniske komponenter.
- Ikke bruk enheten dersom du har pacemaker.
- Slå av enheten dersom den forstyrrer eller kan forstyrre medisinsk utstyr.

Eksponering for varme og radiobølger

- Enheten mottar radiosignaler for GPS-posisjonering. Dette medfører ingen ekstra eksponering for brukeren.
- Enheten kommuniserer trådløst med WiFi-sender (f.eks. mobiltelefon med delt internett) og trådløse hodetelefoner via Bluetooth. Strålingen er sammenlignbar med moderne mobiltelefoner.
- Enhetens eksponering for radiofrekvenser og elektromagnetiske felt er ikke vurdert og brukeren benytter systemet på egen risiko.
- Komponentene i enheten avgir varme og overfører varme til kroppen. Det er normalt at enheten blir lunken eller noe varm under bruk. Ved ubehag eller unormalt høy temperatur, slå av enheten og kontakt Nordic Evolution.
- Bruk kun den medfølgende antennen.

GARANTI

Enheten er garantert av Nordic Evolution å være fri for material- og produksjonsfeil i ett år fra kjøpsdato. I garantiperioden vil Nordic Evolution reparere eller erstatte komponenter som ikke fungerer ved normal bruk. Nordic Evolution garanterer ikke for posisjonsnøyaktighet, enhetens salgbarhet eller egnethet til andre formål enn digital ledsaging.

Nordic Evolution har enerett til å reparere eller erstatte deler av enhetens maskinvare eller programvare, og avgjør alene nivå og omfang av reparasjonen. Et defekt produkt kan i garantiperioden erstattes med et nytt eller fabrikkoverhelt produkt, alternativt kan kjøpesummen refunderes. Disse kompensasjonene utgjør kundens eneste krav, og eventuelle tilhørende kostnader erstattes ikke.

Reparasjoner eller erstatninger som dekkes av garantien, utføres kostnadsfritt når det gjelder reservedeler og arbeid, forutsatt at kunden selv dekker frakt tur-retur til Nordic Evolutions kontor i Linköping. Garantiservice kreves ved å kontakte forhandleren eller Nordic Evolution direkte. Enheten skal pakkes godt og beskyttes under frakt, og det skal legges ved en kopi av originalkvitteringen. Kvitteringen kreves somkjøpsbevis for å motta garantiservice. Enheten skal sendes med frakt betalt til Nordic Evolution.

Garantiene beskrevet i dette dokumentet gjelder eksklusivt og i stedet for alle andre garantier (uttrykkelige eller underforståtte), inkludert det ansvarsgrunnlaget som er angitt her.

Garantien gjelder ikke for:

- Enheter (inkl. medfølgende hodetelefoner) som er åpnet.
- Enheter brukt i strid med gjeldende lovverk.
- Uautoriserte åpninger eller inngrep.
- Forbruksdeler som batterier.
- Ytre kosmetiske skader.
- Skader forårsaket av uhell (f.eks. fall).
- Skader fra feil bruk.
- Skader fra vann, fukt, oversvømmelse, brann, støt eller naturhendelser.
- Skader forårsaket av service utført av uvedkommende.
- Skader fra modifikasjoner som ikke er skriftlig godkjent av Nordic Evolution.
- Problemer ved bruk i andre land enn det som ble oppgitt ved kjøpet.